

# КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО ПО САМОТЕСТИРОВАНИЮ




Продукт: SARS-CoV-2 Rapid Antigen Test

Производитель: Roche

## Подготовка

Для тестирования в наличии должны быть следующие компоненты:

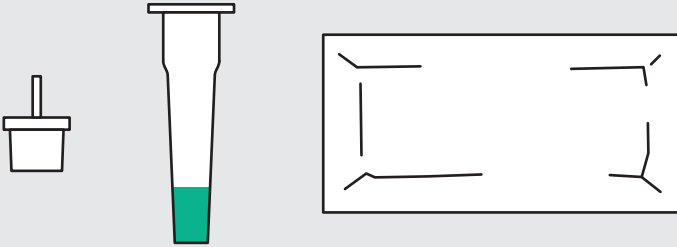

Для взятия пробы используйте зонд-тампон, который продается отдельно (марка: Nasal Swabs, кат. № 09 421 777 001).




## Взятие пробы (при комнатной температуре)

Введите зонд-тампон в каждую ноздрю прилб. на 2 см, поверните по четыре раза, касаясь при этом слизистой оболочки (прим. 15 секунд)

4 x


1

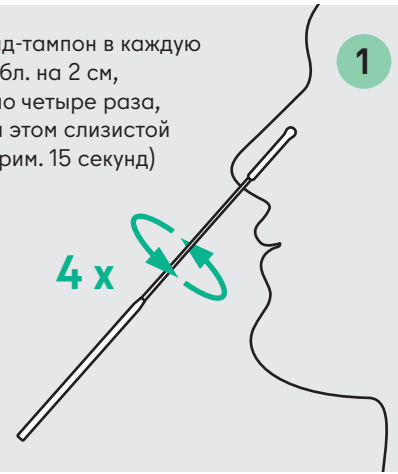

## Правильное обращение с образцом

Вставьте зонд-тампон и поверните более 10 раз

При этом прижимайте пробирку к зонду для выделения антигенов

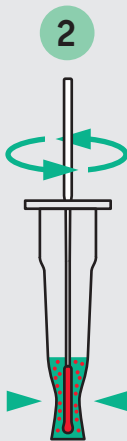


более 10 x

Извлеките зонд-тампон, плотно прижимая его к стенке пробирки, и закройте пробирку крышечкой



Нанесите четыре капли в углубление для пробы на тесте

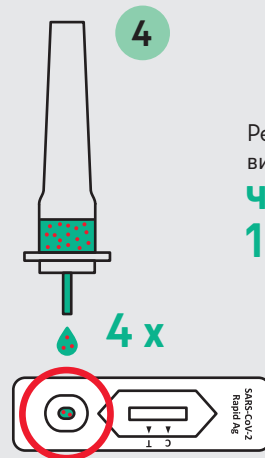

4 x


Результат виден через 15 мин



По прошествии 30 минут результат больше не подлежит оценке!


## Оценка результатов

Любой цветовой оттенок тестовой полоски (Т) считается положительным

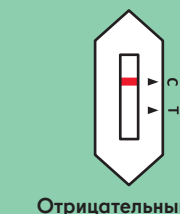


Отрицательный

Цветная контрольная (С) полоска

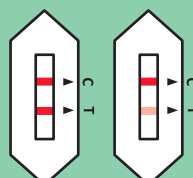

Положительный

Цветная контрольная (С) и тестовая (Т) полоска

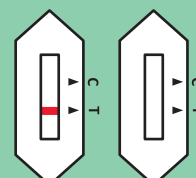

Недействительный/неясный

Контрольная (С) полоска отсутствует

Учащиеся и персонал школы/детского сада могут посещать школу/детский сад

— Родители уведомляют школу, что ребенок заболел, персонал школы/детского сада уведомляет о болезни  
— Учащиеся и персонал школы/детского сада повторно делают ПЦР-тест в одном из центральных центров тестирования

Повторный тест с новым материалом

## Утилизация



Использованные наборы для теста утилизируются отдельно вместе с домашними отходами